

Capitolo del Fascicolo Tecnico: <b>Istruzioni</b>	Codice del documento:
Stato del documento: <b>Copia in distribuzione controllata</b>	<b>FT. Med1</b>
	Revisione: <b>01 del 17/09/2020</b>
Il contenuto di questo documento è di proprietà della ditta Dress & Company S.r.l. e non può essere riprodotto o divulgato a terzi senza autorizzazione. La documentazione è redatta da Studio Europa S.r.l. La società tutelerà i propri diritti a norma di legge.	

# 8.

## Istruzioni d'Uso

Il contenuto di questo documento è di proprietà della ditta Dress & Company S.r.l. e non può essere riprodotto o divulgato a terzi senza autorizzazione. La documentazione è redatta da Studio Europa S.r.l.

La società tutelerà i propri diritti a norma di legge.

# Istruzioni d'uso e manutenzione

**1 Nome e codice**

Mascherina medica Med1 e Med1 Small (per Bambini)

**2 Applicazione**

Limitazione della trasmissione di agenti infettivi. Dispositivo medico

**3 Indicazioni**

La mascherina medica Med1 e Med1 Small è progettata e realizzata allo scopo di limitare la trasmissione di agenti infettivi e garantire la protezione delle vie respiratorie. Realizzata in triplo strato di TNT

**4 Classe di protezione**

Mascherina di Tipo II – Classe I Direttiva 93/42/CEE

**5 Norme tecniche applicate**

UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993:2010  
Test Report N° 7\_18/09/20 e N° 9\_11/09/20

**6 Scadenza**

Se conservato nella custodia originale, 4 anni dalla data di costruzione riportata sull'etichetta.

**7 Imballaggio**

Involucro in plastica sigillata. Elemento riciclabile secondo normativa vigente.

**8 Simbologia**



**9 Istruzioni d'uso**



1. Lavarsi bene le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina
2. Controllare che la mascherina non sia rotta o che abbia buchi/discontinuità
3. Distendere la mascherina tenendo la parte più rigida verso l'alto
4. Tenere la mascherina per gli elastici e tenderli dietro le orecchie
5. Verificare che la mascherina aderisca bene al viso coprendo naso bocca e mento
6. Far aderire il nasello alla forma del naso

**N.B. Per la Med1 Small, una persona adulta e con capacità di intendere e di volere, dovrà istruire il bambino destinatario della mascherina circa il corretto uso della stessa**

**10 Avvertenze**

Verificare l'integrità della mascherina prima dell'uso. Se presenti lacerazioni e/o macchie utilizzare una maschera sostitutiva. Se risulta impossibile ottenere un'adeguata aderenza della mascherina al profilo del volto, non entrare in ambienti di rischio potenziale. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in questa nota può indurre ad un uso errato del dispositivo e causare malattie e morte. Utilizzare la mascherina solo per l'uso consentito. Utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati con sufficiente tenore di ossigeno per sostenere la vita. Non utilizzare quando le concentrazioni dei contaminanti sono immediatamente pericolose per la salute o la vita. Non utilizzare in atmosfera dove c'è pericolo d'esplosione o gas tossici. Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se (a) la respirazione diventa difficoltosa, o (b) si avvertono senso di angoscia o vertigini. Peli di barba, ed affezioni respiratorie possono ridurre l'efficienza di queste semi-maschere filtranti. Non modificare od alterare in nessun modo il dispositivo sanitario. Solo monouso. Non richiede manutenzione. Scartare dopo il singolo utilizzo. Conservare le mascherine non ancora utilizzate nella loro confezione integra in ambiente lontano dalla luce del sole.

**11 Costruttore**

**Dress & Company S.r.l.** - Via Saverio Baldacchini, 6 - 80044 – Ottaviano (NA) - P. Iva: 05433931218  
Sito Web: [www.dresscompany.it](http://www.dresscompany.it) - Prodotto fabbricato in Italia

**12 Dichiarazione di Conformità**

Visionabile sul sito del fabbricante <https://www.dresscompany.it/>

Capitolo del Fascicolo Tecnico: <b>Istruzioni</b>	Codice del documento:
Stato del documento: <b>Copia in distribuzione controllata</b>	<b>FT. Med1</b>
	Revisione: <b>01</b> del <b>17/09/2020</b>
Il contenuto di questo documento è di proprietà della ditta Dress & Company S.r.l. e non può essere riprodotto o divulgato a terzi senza autorizzazione. La documentazione è redatta da Studio Europa S.r.l. La società tutelerà i propri diritti a norma di legge.	