

Capitolo del Fascicolo Tecnico: Istruzioni	Codice del documento:
Stato del documento: Copia in distribuzione controllata	FT. Med1 Plus Revisione: 00 del 28/10/2020
Il contenuto di questo documento è di proprietà della ditta Dress & Company S.r.l. e non può essere riprodotto o divulgato a terzi senza autorizzazione. La documentazione è redatta da Studio Europa S.r.l. La società tutelerà i propri diritti a norma di legge.	

8.

Istruzioni d'Uso

Il contenuto di questo documento è di proprietà della ditta Dress & Company S.r.l. e non può essere riprodotto o divulgato a terzi senza autorizzazione. La documentazione è redatta da Studio Europa S.r.l.

La società tutelerà i propri diritti a norma di legge.

Istruzioni d'uso e manutenzione

- 1 **Nome e codice** Mascherina medica Med1 Plus e Med1 Plus Small
- 2 **Applicazione** Limitazione della trasmissione di agenti infettivi. Dispositivo medico
- 3 **Indicazioni** La mascherina medica Med1 Plus è progettata e realizzata allo scopo di limitare la trasmissione di agenti infettivi e garantire la protezione delle vie respiratorie. Realizzata in triplo strato di TNT. Il modello Med1 Plus Small è realizzata, con analoga stratigrafia e prestazioni, ma con geometrie ridotte per aderire meglio ai volti di piccole dimensioni
- 4 **Classe di protezione** Mascherina di Tipo II – Classe I Direttiva 93/42/CEE
- 5 **Norme tecniche applicate** UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993:2010
Test Report N° 7_18/09/20 e N° 9_11/09/20
- 6 **Scadenza** Se conservato nella custodia originale, 4 anni dalla data di costruzione riportata sull'etichetta.
- 7 **Imballaggio** Involucro in plastica sigillata o cartone. Elemento riciclabile secondo normativa vigente.



8 **Simbologia**

								
Temperatura ambiente stoccaggio	Costruttore	Data Fabbricazione	Scadenza	Non bagnare	Non riutilizzare	Non sterile	Lotto	Non disperdere nell'ambiente

9 **Istruzioni d'uso**



1. Lavarsi bene le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina
2. Controllare che la mascherina non sia rotta o che abbia buchi/discontinuità
3. Distendere la mascherina tenendo la parte più rigida verso l'alto
- 4 Tirare gli elastici posizionati lungo i bordi laterali corti al fine di srotolarli e renderli utilizzabili dall'operatore. Portare gli elastici ottenuti dietro le orecchie come da immagine 4.
5. Verificare che la mascherina aderisca bene al viso coprendo naso bocca e mento
6. Far aderire il nasello alla forma del naso
7. **N.B.** Per la Med1 Plus Small, una persona adulta e con capacità di intendere e di volere, dovrà istruire il destinatario della mascherina circa il corretto uso della stessa

10 **Avvertenze**

Verificare l'integrità della mascherina prima dell'uso. Se presenti lacerazioni e/o macchie utilizzare una maschera sostitutiva. Se risulta impossibile ottenere un'adeguata adesione della mascherina al profilo del volto, non entrare in ambienti di rischio potenziale. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in questa nota può indurre ad un uso errato del dispositivo e causare malattie e morte. Utilizzare la mascherina solo per l'uso consentito. Utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati con sufficiente tenore di ossigeno per sostenere la vita. Non utilizzare quando le concentrazioni dei contaminanti sono immediatamente pericolose per la salute o la vita. Non utilizzare in atmosfera dove c'è pericolo d'esplosione o gas tossici. Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se (a) la respirazione diventa difficoltosa, o (b) si avvertono senso di angoscia o vertigini. Peli di barba, ed affezioni respiratore possono ridurre l'efficienza di queste semi-maschere filtranti. Non modificare od alterare in nessun modo il dispositivo sanitario. Solo monouso. Non richiede manutenzione. Scartare dopo il singolo utilizzo. Conservare le mascherine non ancora utilizzate nella loro confezione integra in ambiente lontano dalla luce del sole.

11 **Costruttore**

Dress & Company S.r.l. - Via Saverio Baldacchini, 6 - 80044 – Ottaviano (NA) - P. Iva: 05433931218
Sito Web: www.dresscompany.it - Prodotto fabbricato in Italia

12 **Dichiarazione di Conformità**

Visionabile sul sito del fabbricante <https://www.dresscompany.it/>